

AED HeartSine® Samaritan® PAD 350 P

Klasyczny, automatyczny defibrylator zewnętrzny.

Karta katalogowa

Samaritan PAD 350 P to poręczny, lekki, zewnętrzny, publiczny defibrylator AED.

Przez cały proces ratowania życia poszkodowanego, urządzenie zwraca się bezpośrednio do osoby udzielającej pomocy, motywując do dalszej pracy. Za pomocą trzech prostych symboli i poleceń przeprowadza nawet niedoświadczonych użytkowników krok po kroku przez cały proces postępowania ratowniczego.

Urządzenie analizuje rytm serca i podaje impuls defibrylacyjny, pozwalając przywrócić prawidłowy rytm serca u osoby poszkodowanej.

Największy atut naszego produktu to system zasilania - połączenie baterii i elektrod w jednej kasecie w systemie Pad- Pak™, co oznacza jedną datę ważności do monitorowania oraz niższe koszty eksploatacji urządzenia w przyszłości.

Na tle konkurencyjnych urządzeń wyróżnia się przede wszystkim niewielką wagą – waży jedynie nieco ponad 1 kg i posiada niewielkie wymiary, umieszczony jest w wygodnej i trwałej torbie, która sprawdza się zarówno podczas transportu, jak i podczas użytkowania urządzenia.

Wysokie wskaźniki odporności na pył, wilgoć, zanieczyszczenia, wstrząsy oraz wysokie temperatury czynią z Samaritana 350 P prawdziwie niezawodny defibrylator AED, a potwierdza to dodatkowo aż 8-letni okres gwarancji, który udzielamy na ten produkt.

Defibrylator Samaritan 350 P to jeden z najczęściej wybieranych defibrylatorów AED w Polsce.



20 x 18.4

cm wielkości

90

min zapisu EKG

8 lat

gwarancji na AED

4 lata

gwarancji na baterie i elektrody

FDA & CE

Certyfikaty

IP 56

Najwyższa odporność



Unikalna cecha tego modelu prostota użycia. Defibrylator jest lekki, poręczny, czytelny. Komunikaty głosowe wspierane są przez komunikaty graficzne. AED nie wykona kolejnego kroku jeśli poprzedni nie zostanie wykonany poprawnie. Dodatkowo AED udziela wsparcia w RKO dzięki metronomowi, który uruchamia się samoczynnie. Mając to urządzenie jesteśmy w stanie szybko, skutecznie i bezpiecznie udzielić pierwszej pomocy oraz w prosty sposób przeprowadzić defibrylację.



Wysoki poziom ochrony przed kurzem i wodą

Stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem pyłu i wody to IP56, jeden z najwyższych w branży.



Technologia sprawdzona klinicznie

Unikatowa technologia elektrod oraz technologia dwufazowa SCOPE, krzywa fali o niskiej energii, która automatycznie dostosowuje się do różnic w impedancji pacjenta.



Łatwy do transportowania

Najmniejsza wśród wiodących defibrylatorów AED waga i rozmiary gwarantują łatwość transportu oraz możliwość zastosowania w przypadku ograniczonej przestrzeni.



Unikalny pakiet pediatryczny

Elektrody przystosowane dla dzieci oraz impuls defibrylacyjny o obniżonej energii w przypadku dzieci w wieku od 1 do 8 lat lub ważących maksymalnie 25 kg.



Dwie części, jeden termin ważności

Innowacyjny zestaw Pad-Pak, zintegrowana bateria oraz kasetka z elektrodami z jednym wspólnym terminem ważności, oferują prostą wymianę tylko jednego elementu i tylko raz na cztery lata.



Niski koszt zakupu i eksploatacji

Nie tylko korzystne warunki zakupu AED ale również czteroletnia gwarancja na baterię z elektrodami Pad-Pak oferuje istotne oszczędności w stosunku do innych defibrylatorów, które wymagają oddzielnej wymiany baterii oraz elektrody.




8-letnia gwarancja

Defibrylator AED jest objęty gwarancją producenta przez 8 lat.



Metronom

Pozwalający na wsparcie w resuscytacji. Dzięki rytmicznemu dźwiękowi wykonujemy uciski dokładnie w takim tempie jakie jest zalecane dla poszkodowanego.

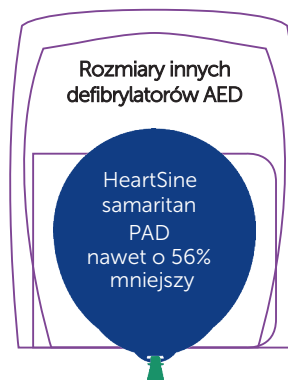

PARAMETRY



Siła komunikacji w trzech prostych symbolach



Tylko dwa przyciski. Jeden czytelny panel graficzny.



Niezawodny. Poddawany auto testom gwarantującym prawidłowe działanie



Przenośny. Gotowy do pracy bez wyjmowania z torby.



Bez wtyczek. Bez podłączania czegokolwiek.



Technologicznie najlepszy.



Lekki i poręczny.



Absolutnie prosty.

informacje ogólne	Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.
tryb pracy	Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibrylacyjnego.
wygląd	Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.
gotowość do pracy	Migający wskaźnik w kolorze zielonym.
bateria i elektrody	Bateria zintegrowana z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.
opakowanie	Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.
wyposażenie	Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.
energia	Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) który dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.
gotowość do pracy	Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.
temperatura przechowywania	Od 0°C do 50°C.
wilgotność względna	Od 5% do 95%.
wibracje	MIL STD 810F metoda 514.5+
bateria	Dorosły: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J
czas ładowania	Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.
pojemność baterii	Powyżej 100 wstrząsów.
długość przewodów	1 metr
wykonanie	Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester.
metronom	Graficzny i dźwiękowy, uruchamiany automatycznie.
EKG	Pełny zapis EKG, na karcie, minimum 90 minut, dane do pobrania w postaci pliku PDF
język	Polski (inne języki jako opcjonalne).

Więcej informacji na temat defibrylatorów AED wraz z ofertą znajdziesz u Twojego dystrybutora.



HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
United Kingdom
Tel: +44 28 9093 9400
Fax: +44 28 9093 9401



UL Classified. See complete marking on product.

The SAM 500P is not available for sale in the U.S.

© 2019 HeartSine Technologies. All rights reserved. H009-043-201-0 IE

DYSTRYBUTOR:



AQUAMED24.PL

Bądź gotów na niespodziewane!

www.aquamed.pl
biuro@aquamed.pl | 600-202-436